



Huisartsenbrochure

Gepersonaliseerde oplossingen voor een actiever en mobieler leven

Aqtor! is gespecialiseerd in het aanmeten, fabriceren en afleveren van terugbetaalde orthopedische hulpmiddelen, mobiliteitshulpmiddelen en bandagisterie.

Onze missie is mensen met mobiliteitsbeperkingen in staat stellen om hun bewegingsvrijheid terug te winnen. Wij vertrekken daarbij steeds vanuit hun bewegingsmogelijkheid, niet vanuit hun fysieke beperking!

Ons team van RIZIV erkende verstrekkers is gespecialiseerd in de 5 domeinen van de technische orthopedie:

- Orthesen
- Prothesen
- Orthopedische schoenen
- Bandagisterie
- Mobiliteit

Dankzij deze allround dienstverlening kunnen wij de beste patiëntgerichte zorg aanbieden. Samen met de behandelend geneesheer zoeken we naar de juiste oplossingen om de patiënt een actiever en mobieler leven te laten leiden.



Innovatieve orthopedische oplossingen

Aqtor! produceert orthopedische hulpmiddelen gaande van steunzolen, korsetten en braces tot computergestuurde prothesen in eigen ateliers. De knowhow en competenties van onze verstrekkers en het vakmanschap van onze atelier-medewerkers staan hier garant voor kwaliteit.

Onze R&D-afdeling zorgt voor de continue ontwikkeling van nieuwe producten, technieken én technologieën die in het hele proces - van maatname tot aflevering - toegepast worden.

Toepassingen zoals CAD/CAM, scanning, 3D-printing en andere digitale applicaties verbeteren de workflow, de werkomstandigheden, de snelheid van aflevering, de kwaliteit van het product en de distributie ervan. Dankzij deze nieuwe technologieën daalt ons verbruik van bijvoorbeeld gips en schuimdozen en reduceren we de hoeveelheid afval, waardoor onze ecologische voetafdruk gevoelig verlaagt.

Zowel prefab- als maatwerktoepassingen zijn mogelijk, in functie van de behoeften voor elke individuele patiënt. Voor prefab hebben onze verstrekkers de vrije keuze uit een ruim assortiment kwaliteitsmerken.

Overal in beweging

Artsen kunnen hun patiënten doorverwijzen naar één van de vele **Aqtor! Mobility Centers**, verspreid over heel België. Patiënten kunnen hier terecht voor maatname, aanpassing en aflevering van orthopedische hulpmiddelen, mobiliteitshulpmiddelen en bandagisterie, voor biomechanische analyses, en voor professioneel advies op maat. Ze krijgen er vrijblijvend informatie over het gamma aan terugbetaalde producten, en ze krijgen de kans om er verschillende mobiliteitshulpmiddelen uitvoerig te testen.

Daarnaast vinden patiënten in ons groot netwerk van **OrthoShop** thuiszorg-apotheken een geïntegreerd zorgaanbod gericht op zorg in de thuissituatie, en met het oog op een optimale zelfstandigheid en levenskwaliteit.


Zie www.orthoshop.be voor een overzicht van alle OrthoShop thuiszorg-apotheken.



Onze oplossingen




Orthesen & bandages

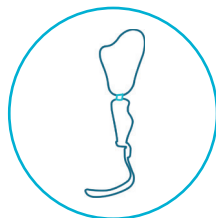

Prothesen



Mobiliteitshulpmiddelen

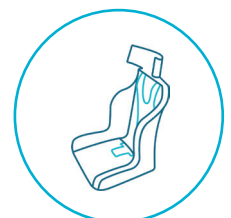


Zitschalen



Steunzolen



Orthopedische schoenen

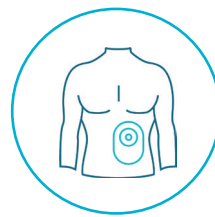

Stoma- en incontinentiemateriaal



Compressiekleding en borstprothesen

Welke orthopedische hulpmiddelen kunt u als huisarts voorschrijven?

Bandagisterie

- Lumbostaten
- Breukbanden
- Buikgordels
- Stomamateriaal
- Incontinentiemateriaal
- Borstprothesen
- Therapeutische elastische beenkousen

Mobiliteitshulpmiddelen

- Rolstoelen
- Scooters
- Drie- of vierwiel fietsen
- Loophulpen

→ Afhankelijk van de te volgen procedure (zie blz. 8)



Wat dient u als huisarts te doen voor:

Aanvraag bandagisterie

Invullen medisch voorschrift met het gewenste hulpmiddel (zie overzicht verder in de brochure) en een medische indicatie.

Aanvraag mobiliteitshulpmiddel

Invullen medisch voorschrift voor mobiliteitshulpmiddel volgens functiebeperking:

- 0: GEEN beperking of participatieprobleem
- 1: LICHTE beperking of participatieprobleem
- 2: MATIGE beperking of participatieprobleem
- 3: ERNSTIGE beperking of participatieprobleem
- 4: VOLLEDIGE beperking of participatieprobleem
- 9: NIET VAN TOEPASSING

Achteraan in de brochure vindt u een overzicht van de scores waaraan een patiënt moet voldoen om recht te hebben op een bepaald mobiliteitshulpmiddel.

Bij vragen aarzel niet ons te contacteren!

AANVRAAG

via medisch voorschrift
door huisarts of geneesheer-specialist




AANMETEN & AFLEVEREN

door bandagist

Lumbostaten (maatwerk)

Medische indicaties:

- Pijn en ruginsufficiënties in dorso-lumbaal en sacro-iliacaal gebied
- Lumbalgie
- Spondylose/spondylartrose/spondylolisthesis
- Osteoporose
- Discus hernia
- Artrose

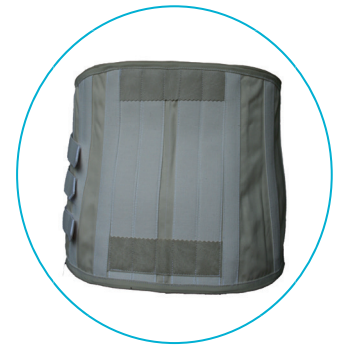

Te vermelden op voorschrift:

Klinische diagnose + 'Lumbostaat op maat'

Breukbanden (prefab en maatwerk)

Medische indicaties:

- Inguinale breuk (unilateraal of bilateraal)
- Scrotale breuk
- Crurale breuk



Te vermelden op voorschrift:

Klinische diagnose + 'Breukband op maat/prefab'

Buikgordels (maatwerk)

Medische indicaties:

- Buikwand eventratie
- Navelbreuk
- Diastasis van de rechte buikspieren
- Stoma



Te vermelden op voorschrift:

Klinische diagnose + 'Buikgordel op maat'

Stomamateriaal


Medische indicaties:

- Darmkanker of colitis ulcerosa
- Ernstige darmontsteking
- Onbehandelbare verstopping
- Gezwel in (endel)darm
- Anusatresie of ziekte van Hirschsprung

Te vermelden op voorschrift (bijlage 93):

Klinische diagnose + 'Stomamateriaal'

Bijlage 93 geeft de patiënt toegang tot een virtuele portefeuille waarmee het stomamateriaal bij een erkend bandagist besteld kan worden. Deze portefeuille wordt elke 3 maanden bijgevuld. Een nieuw voorschrift is niet nodig, behalve in uitzonderlijke situaties. Voor meer informatie raadpleeg uw OrthoShop of erkend bandagist.

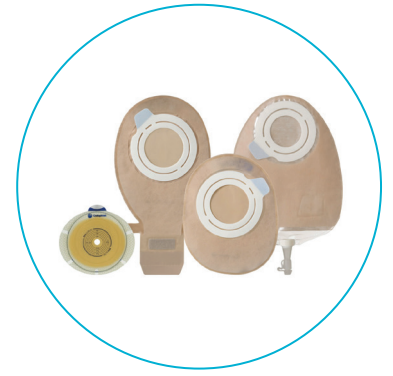

Incontinentiemateriaal

Medische indicaties:

- Bij urinaire incontinentie kunnen mannen gebruik maken van een condoomkatheter + opvangsysteem.

Te vermelden op voorschrift:

Klinische diagnose + 'Incontinentiemateriaal'

Het afleveren van incontinentiemateriaal gebeurt via dotatieperiode van 3 maanden: 20 nachtzakken, 20 dagzakken en 90 zelfklevende penishulzen per dotatieperiode.



Borstprothesen

Medische indicaties:

- Totale of partiële mammectomie
- Aangeboren asymmetrie

Voorschrift door:

Geneesheer-specialist

- Postoperatieve borstprothese

Huisarts of geneesheer-specialist

- Voorlopige borstprothese
- Definitieve borstprothese

Te vermelden op voorschrift (per kant een voorschrift nodig):

Klinische diagnose + voorlopige of definitieve, volledige of gedeeltelijke prothese + linker- of rechterborst



Therapeutische elastische beenkousen

Medische indicaties:

- Uni- of bilateraal lymfoedeem na lies- of bekkenklieruitruiming
- Lymfoedeem na bestraling van de liesstreek
- Congenitale vasculaire malformatie
- Chronisch primair erfelijk lymfoedeem
- Preventie van recidief veneuze ulcera bij chronische insufficiëntie
- Aanwezigheid van een geobjectiveerde diepe veneuze trombose
- Aanwezigheid van een geobjectiveerd posttrombotisch syndroom



Voorschrift door:

Geneesheer-specialist

- Eerste aflevering bij lymfoedeem

Huisarts of geneesheer-specialist

- Eerste en volgende afleveringen bij chronische veneuze aandoeningen
- Tweede en volgende afleveringen bij lymfoedeem

Te vermelden op voorschrift (bijlage 94):

Klinische diagnose + type kous (apart voorschrift voor links of rechts), noodzakelijke drukklasse

Armkousen en handschoenen wegens lymfoedeem

Medische indicaties:

- Lymfoedeem bovenste ledemaat: aangeboren of na gedeeltelijke of totale mastectomie
- Vasculaire malformatie bovenste ledemaat (bij geboorte aanwezig)

Voorschrift door:

Enkel geneesheer-specialist!

Te vermelden op voorschrift (bijlage 94):

Klinische diagnose + handschoen en/of armkous (rechts of links), noodzakelijk kwikdruk minimum 15 mm Hg



MOBILITEITSHULPMIDDELEN



DE 5 MOGELIJKE PROCEDURES

Procedure	Document	In te vullen
Vereenvoudigde aanvraagprocedure	Medisch voorschrift MOHM	Behandelend arts ¹
	Aanvraagdocument	Verstrekker + gebruiker
Basisprocedure	Medisch voorschrift MOHM	Behandelend arts
	Aanvraagdocument	Verstrekker + gebruiker
Uitgebreide procedure	Medisch voorschrift MOHM	Behandelend arts
	Motiveringsrapport	Verstrekker
	Aanvraagdocument	Verstrekker + gebruiker
	Testrapport (bij elektronische binnenscooter en bij hernieuwing elektronische rolstoel/scooter van andere subgroep)	Verstrekker + gebruiker
Uitgebreide plus procedure	[Medisch voorschrift MOHM] ²	[Behandelend arts] ²
	Motiveringsrapport	Verstrekker
	RAR (Rolstoel Advies Rapport)	RAT (Rolstoel Advies Team)
	Aanvraagdocument	Verstrekker + gebruiker
	Testrapport (bij elektronische rolstoel/scooter)	Verstrekker + gebruiker
BTC ³ (Bijzondere Technische Commissie)	[Medisch voorschrift MOHM] ²	[Behandelend arts] ²
	Motiveringsrapport	Verstrekker
	RAR (Rolstoel Advies Rapport)	RAT (Rolstoel Advies Team)
	Bestek/offerte	Verstrekker + gebruiker
	Testrapport (bij elektronische rolstoel/scooter)	Verstrekker + gebruiker
	Aanvraagdocument	Verstrekker + gebruiker

¹ Bij aanvragen verhuur SDA wordt er ook een vereenvoudigde aanvraag gevolgd, maar hier moet het medisch voorschrift worden ingevuld door een neuroloog, en het RAR (Rolstoel Advies Rapport) door een GRAT (Gespecialiseerd Rolstoel Advies Team).

² Bij de uitgebreide plus procedure en de BTC procedure, moet er alleen een medisch voorschrift zijn als het een aanvraag voor een scooter betreft. In alle andere gevallen is het RAR (Rolstoel Advies Rapport) voldoende.

³ In uitzonderlijke situaties moet een BTC procedure worden gevolgd (bv. maatwerk, bepaalde aanpassingen, producten die niet op de lijst staan, ...). Onze verstrekker kan u hierover verder informeren.

Rolstoelen (volwassenen)




	Procedure eerste aanvraag	Procedure hernieuwing ¹
Manuele standaard rolstoel	Basisprocedure	Basisprocedure
Manuele modulaire rolstoel	Uitgebreide procedure	Basisprocedure Indien andere hoofd- of subgroep: idem eerste aanvraag
Verzorgingsrolstoel	Uitgebreide procedure	Basisprocedure Indien andere hoofd- of subgroep: idem eerste aanvraag
Actieve rolstoel	Uitgebreide plus procedure	Basisprocedure Indien andere hoofd- of subgroep: idem eerste aanvraag
Elektronische rolstoel	Uitgebreide plus procedure	Basisprocedure Indien andere subgroep: uitgebreide procedure
Rolstoelonderstel voor zitschelp of modulair aanpasbare ziteenheid	Uitgebreide plus procedure	Basisprocedure Indien andere hoofd- of subgroep: idem eerste aanvraag

Elektronische hoepelondersteuning voor manuele rolstoel



	Procedure eerste aanvraag	Procedure hernieuwing
Elektronische hoepelondersteuning voor manuele rolstoel	Uitgebreide plus procedure	Uitgebreide procedure Indien andere hoofd- of subgroep: idem eerste aanvraag

Antidecubitus (AD) zitkussen

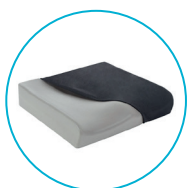

	Procedure eerste aanvraag	Procedure hernieuwing
Antidecubitus (AD) zitkussen	Uitgebreide procedure	Uitgebreide procedure

¹ Bij voortijdige aanpassingen (vóór het verstrijken van de hernieuwingstermijn) dient de uitgebreide procedure te worden gevolgd.

Rolstoelen (kinderen)



	Procedure eerste aanvraag	Procedure hernieuwing ¹
Manuele standaard rolstoel Actieve kinderrolstoel Duuwandelwagen	Uitgebreide procedure	Basisprocedure Indien andere hoofd- of subgroep: idem eerste aanvraag
Elektronische kinderrolstoel	Uitgebreide plus procedure	Basisprocedure Indien andere subgroep: uitgebreide procedure

Sta-systemen



	Procedure eerste aanvraag	Procedure hernieuwing ¹
Rolstoel met mechanische sta-functie Rolstoel met elektronische sta-functie	Uitgebreide plus procedure	Basisprocedure Indien andere hoofd- of subgroep: idem eerste aanvraag
Elektronisch instelbare statafel	Uitgebreide plus procedure	Basisprocedure Indien andere hoofd- of subgroep: idem eerste aanvraag

Loophulpmiddelen



	Procedure eerste aanvraag	Procedure hernieuwing ¹
Looprek met 4 vaste steunen Rollator met 2 vaste steunen en 2 wielen Rollator met 3 of 4 wielen	Vereenvoudigde aanvraagprocedure	Vereenvoudigde aanvraagprocedure

Scoters



	Procedure eerste aanvraag	Procedure hernieuwing ¹
Binnenscooter	Uitgebreide procedure	Basisprocedure Indien andere subgroep: uitgebreide procedure
Binnen-/buitenscooter of buitenscooter	Uitgebreide plus procedure	Basisprocedure Indien andere subgroep: uitgebreide procedure

¹ Bij voortijdige aanpassingen (vóór het verstrijken van de hernieuwingstermijn) dient de uitgebreide procedure te worden gevolgd.

Drie- of vierwiel fietsen



	Procedure eerste aanvraag	Procedure hernieuwing ¹
Standaard drie- of vierwiel fiets	Uitgebreide procedure	Basisprocedure Indien andere hoofd- of subgroep: idem eerste aanvraag
Zitdriewiel fiets	Uitgebreide plus procedure	Basisprocedure Indien andere hoofd- of subgroep: idem eerste aanvraag

PROCEDURES VERHUUR

	Mobiliteitshulpmiddel	Procedure
Huur in WZC, thuiszorg (>85 jaar) of palliatief statuut	Manuele standaard rolstoel	Basisprocedure
	Manuele modulaire rolstoel Verzorgingsrolstoel	Uitgebreide procedure
Tijdelijke huur	Manuele standaard rolstoel Manuele modulaire rolstoel Verzorgingsrolstoel Actieve rolstoel	Basisprocedure

UITZONDERINGEN BIJ AANVRAGEN VOOR PERSONEN MET SDA²

Verhuur	Manuele rolstoel ³	Vereenvoudigde aanvraagprocedure <ul style="list-style-type: none"> Bij start manuele standaard of modulaire rolstoel, verzorgingsrolstoel of actieve rolstoel met medisch voorschrift ingevuld door een neuroloog
Verhuur	Elektronische rolstoel Elektronische scooter	Vereenvoudigde aanvraagprocedure <ul style="list-style-type: none"> Bij start elektronische rolstoel of elektronische scooter met Rolstoel Advies Rapport (RAR) ingevuld door een Gespecialiseerd Rolstoel Advies Team (GRAT)

Slechts een beperkt aantal gespecialiseerde verstrekkers zijn gemachtigd om personen met een SDA te helpen. Aqtor! is daar één van.

COMBINATIEMOGELIJKHEDEN

Sommige types van hulpmiddelen mag men combineren of cumuleren, bijvoorbeeld een rolstoel en een loophulpmiddel. Onze verstrekkers kunnen u hierover verder informeren.

¹ Bij voortijdige aanpassingen (vóór het verstrijken van de hernieuwingstermijn) dient de uitgebreide procedure te worden gevolgd.

² Loophulpmiddelen komen niet in aanmerking voor verhuur. Enkel aankoop is mogelijk via de vereenvoudigde aanvraagprocedure.

³ Een manuele rolstoel is cumuleerbaar met een elektronische rolstoel of een elektronische scooter.

SCORES MOBILITEITSHULPMIDDELEN

	Verplaatsen binnenshuis	Verplaatsen buitenshuis	Stappen en/of staande houding	Zitten	Evenwicht	Bovenste ledematen	Gebruik manuele rolstoel	Onderste ledematen	Zelfstandige transfer
Manuele rolstoel volwassene									
Manuele standaard rolstoel	MIN 2	OF MIN 3							
Manuele modulaire rolstoel	MIN 3	MIN 3	MIN 3						
Manuele modulaire rolstoel met zitbreedte vanaf 58 cm	MIN 3	MIN 3	MIN 3						
Manuele verzorgingsrolstoel	4	4		4		MIN 3			4
Manuele verzorgingsrolstoel met een modulair korrelzitsysteem	4	4		4		MIN 3			4
Manuele actief rolstoel of manuele actief rolstoel met individuele maatvoering	4	4	4			MAX 3			
Rolstoel met mechanische of elektrische sta-functie	4	4	4			MAX 2		4	
Manuele kinderrolstoel									
Standaard duwwandelwagen	MIN 2	MIN 3	MIN 3						
Standaard duwwandelwagen - type buggy groot formaat	MIN 2	MIN 3	MIN 3						
Modulaire duwwandelwagen	MIN 3	4	MIN 3	MIN 3					
Manuele standaardrolstoel	MIN 2	MIN 3							
Manuele actief kinderrolstoel	MIN 3	OF 4	MIN 3						
Elektronische rolstoel volwassene									
Gebruik binnenshuis	4	4	4			4	4		MIN 3
Gebruik binnens- / buitenshuis	4	4	4			4	4		MIN 3
Gebruik buitenshuis	4	4	4			4	4		MIN 3
Elektronische kinderrolstoel									
Gebruik binnenshuis	4	4	4			4	4		
Gebruik binnenshuis +	MIN 3	MIN 3	MIN 3			4	4		
Gebruik binnens- / buitenshuis	4	4	4			4	4		
Gebruik binnens- / buitenshuis +	MIN 3	MIN 3	MIN 3			4	4		
Elektronische scooter									
Elektronische binnenscooter	MIN 3	4	MIN 3	MAX 1		MAX 2	4		
						MAX 1 ^[1]			
Elektronische binnen- / buitenscooter	MIN 3	4	MIN 3	MAX 1		MAX 2	4		
						MAX 1 ^[1]			
Elektronische buitenscooter	MIN 3	4	MIN 3	MAX 1		MAX 2	4		
						MAX 1 ^[1]			
Andere MOHM									
Loophulpmiddel									
Standaard drie- of vierwiel fiets				MIN 2	MIN 2	MIN 2		MIN 2	
Zitdriewiel fiets				MIN 3	MIN 3	MIN 2		MIN 2	
Zitdriewiel fiets met dubbel aandrijvingsysteem d.m.v. voet- en handtrappers				MIN 3	MIN 3	MIN 3		MIN 3	
Elektrisch instelbare statafel	4	4	4					4	
Speciale aanpassing									
Antidecubituskussen	Afhankelijk van het risico op doorzitwonden								
Modulair aanpasbare ziteenheid	4	4	4	MIN 3					
Modulair aanpasbaar rugsysteem	4	4	4	MIN 3					
Elektronische hoepelondersteuning voor de manuele rolstoel - type zonder joystickbesturing		4					MIN 3 ^[2]		
							MIN 2 ^[3]		
Elektronische hoepelondersteuning voor de manuele rolstoel - type met joystickbesturing	4	4					4 ^[4]		
							MIN 3 ^[5]		

Scores mobiliteit:

0: geen beperking of participatieprobleem | 1: lichte beperking of participatieprobleem | 2: matige beperking of participatieprobleem
3: ernstige beperking of participatieprobleem | 4: volledige beperking of participatieprobleem

Extra:

(1) Indien 1 lidmaat affunctioneel is, mag het andere max. licht beperkt zijn.

(2) De functie van de bovenste ledematen is ernstig beperkt (minimaal ICF typering 3), zelfstandig hoepelen met de rolstoel is nog mogelijk, maar verplaatsing is beperkt tot beperkte afstanden binnenshuis of buitenshuis.

(3) De elektronische hoepelondersteuning voor de manuele rolstoel is ook bedoeld voor de gebruiker met een matig beperkte functie van de bovenste ledematen (minimaal ICF typering 2) op voorwaarde dat hij school loopt, beroepsopleiding of herscholing volgt, werkt of een zelfstandige beroepsactiviteit uitvoert.

(4) De functie van de bovenste ledematen is volledig beperkt (ICF typering 4), zelfstandig hoepelen met de rolstoel is mogelijk, maar verplaatsing is beperkt tot minimale afstanden binnenshuis.

(5) De elektronische hoepelondersteuning met joystickbesturing voor de manuele rolstoel is ook bedoeld voor de gebruiker met een ernstig beperkte functie van de bovenste ledematen (minimaal ICF typering 3) op voorwaarde dat hij school loopt, beroepsopleiding of herscholing volgt, werkt of een zelfstandige beroepsactiviteit uitvoert.

HERNIEUWINGSTERMIJNEN MOBILITEITSHULPMIDDELEN

OMSCHRIJVING	< 12 JAAR	12 - 18 JAAR	> 18 JAAR	> 65 JAAR
Manuele rolstoel				
Manuele standaard rolstoel			4	6
Tweede manuele standaard rolstoel			6	9
Manuele modulaire rolstoel			4	6
Tweede manuele modulaire rolstoel			6	9
Manuele modulaire rolstoel met zitbreedte vanaf 58 cm			4	6
Tweede manuele modulaire rolstoel met zitbreedte vanaf 58 cm			6	9
Manuele verzorgingsrolstoel			4	6
Manuele verzorgingsrolstoel uitgevoerd met een modulair korrelzitsysteem			4	6
Manuele actief rolstoel			4	6
Tweede manuele actief rolstoel			6	9
Manuele actief rolstoel met individuele maatvoering			4	6
Rolstoel met mechanische sta-functie			4	6
Rolstoel met elektrische sta-functie			4	6
Standaard duwwandelwagen (type kinderrolstoel)	3	3		
Tweede standaard duwwandelwagen (type kinderrolstoel)	3	3		
Standaard duwwandelwagen - type buggy groot formaat (type kinderrolstoel)	3	3		
Tweede standaard duwwandelwagen - type buggy groot formaat (type kinderrolstoel)	3	3		
Modulaire duwwandelwagen (type kinderrolstoel)	3	3		
Tweede modulaire duwwandelwagen (type kinderrolstoel)	3	3		
Manuele standaard kinderrolstoel	3	3		
Tweede manuele standaard kinderrolstoel	3	3		
Manuele actief kinderrolstoel	3	3		
Tweede manuele actief kinderrolstoel	3	3		
Rolstoelonderstel voor zitschelp	3	3	5	5
Tweede rolstoelonderstel voor zitschelp	3	3	7,5	7,5
Rolstoelonderstel voor modulair aanpasbare ziteenheid	3	3	4	4
Tweede rolstoelonderstel voor modulair aanpasbare ziteenheid	3	3	6	6
Elektronische rolstoel				
Elektronische rolstoel voor gebruik binnenshuis			5	7
Elektronische rolstoel voor gebruik binnens- en buitenshuis			5	7
Elektronische rolstoel voor gebruik buitenshuis			5	7
Elektronische kinderrolstoel voor gebruik binnenshuis	3	3		
Elektronische kinderrolstoel voor gebruik binnens- en buitenshuis	3	3		

HERNIEUWINGSTERMIJNEN MOBILITEITSHULPMIDDELEN

OMSCHRIJVING	< 12 JAAR	12 - 18 JAAR	> 18 JAAR	> 65 JAAR
Elektronische scooter				
Elektronische binnenscooter			4	6
Elektronische binnen-/buitenscooter			6	6
Elektronische buitenscooter			6	6
Drie- of vierwiel fiets en zitdriewiel fiets				
<i>Standaard drie- of vierwiel fiets</i>				
Standaard drie- of vierwiel fiets voor een gebruiker met tussenbeenlengte van meer dan 70 cm	2	4	8	8
Standaard drie- of vierwiel fiets voor een gebruiker met tussenbeenlengte vanaf 50 cm tot en met 70 cm	2	4	8	8
Standaard drie- of vierwiel fiets voor een gebruiker met tussenbeenlengte minder dan 50 cm	2	4	8	8
<i>Zitdriewiel fiets – met bovenstuur (hoge positie)</i>				
Zitdriewiel fiets met bovenstuur in hoge positie, voor een gebruiker met tussenbeenlengte van meer dan 70 cm	2	4	8	8
Zitdriewiel fiets met bovenstuur in hoge positie, voor een gebruiker met tussenbeenlengte tot en met 70 cm	2	4	8	8
<i>Zitdriewiel fiets – met onderstuur en handvatten lateraal aan het zitgedeelte</i>				
Zitdriewiel fiets met onderstuur lateraal aan het zitgedeelte voor een gebruiker met tussenbeenlengte van meer dan 70 cm	2	4	8	8
Zitdriewiel fiets met onderstuur lateraal aan het zitgedeelte voor een gebruiker met tussenbeenlengte tot en met 70 cm	2	4	8	8
<i>Zitdriewiel fiets – met dubbel aandrijvingssysteem d.m.v. voet- en handtrappers</i>				
Zitdriewiel fiets met dubbel aandrijvingssysteem d.m.v. voet- en handtrappers voor een gebruiker met tussenbeenlengte van meer dan 70 cm		4	8	8
Loophulpmiddel				
Loophulpmiddel met 4 vaste steunen	3	3	4	6
Loophulpmiddel met 2 vaste steunen en 2 wielen zonder zit	3	3	4	6
Loophulpmiddel met 2 vaste steunen en 2 wielen met zit	3	3	4	6
Loophulpmiddel met 3 of 4 wielen	3	3	4	6
Loophulpmiddel met ondersteuning van de sta-functie	3	3	4	6
Loophulpmiddel met open looprichting	3	3	4	6
Sta-systeem				
Elektrische instelbare statafel	10	10	10	10
Zitkussen ter preventie van doorzitwonden				
Niet-individueel aanpasbaar zitkussen ter preventie van doorzitwonden	2	2	2	2
Niet-individueel aanpasbaar anatomisch zitkussen ter preventie van doorzitwonden (geïntegreerd in rolstoel)	Volgt de hernieuwingstermijn van de rolstoel			
Individueel aanpasbaar zitkussen ter preventie van doorzitwonden	3	3	3	3
Tweede individueel aanpasbaar zitkussen ter preventie van doorzitwonden	3	3	4,5	4,5
Individueel aanpasbaar zitkussen ter preventie van doorzitwonden type luchtkussens met celstructuren of Flow-Fluid-gelkussens	3	3	3	3
Tweede individueel aanpasbaar zitkussen ter preventie van doorzitwonden type luchtkussens met celstructuren of Flow-Fluid-gelkussens	3	3	4,5	4,5
Elektronische hoepelondersteuning				
Elektronische hoepelondersteuning voor de manuele rolstoel – type zonder joystickbesturing	8	8	8	8
Elektronische hoepelondersteuning voor de manuele rolstoel – type met joystickbesturing	8	8	8	8

HERNIEUWINGSTERMIJNEN BANDAGISTERIE

VERSTREKKING	0 - 2 JAAR	2 - 3 JAAR	3 - 14 JAAR	14 - 15 JAAR	15 - 16 JAAR	16 - 18 JAAR	18 - 21 JAAR	+ 21 JAAR
Breukbanden, riemen en abdominale gordels	6 maand	1 jaar			3 jaar			
Steunzolen	1 jaar						2 jaar	
Lumbostaat	1 jaar			2 jaar				4 jaar
Post-operatieve borstprothese: 1 maal vergoedbaar tot 6 weken na de ingreep								
Voorlopige borstprothese: 1 maal vergoedbaar, ten vroegste 6 weken na de ingreep	1 jaar							
Definitieve borstprothese, leverbaar ten vroegste 1 jaar na afleveringsdatum voorlopige prothese	2 jaar							
Prefab en maatwerk armkous en handschoen	Combinatie 1 = 2 stuks armkous apart + 4 stuks handschoen apart per kalenderjaar Combinatie 2 = 3 stuks armkous met handschoen uit 1 stuk gemaakt per kalenderjaar Combinatie 3 = 1 stuk armkous met handschoen uit 1 stuk + 1 stuk armkous apart + 2 stuks handschoen apart per kalenderjaar							
Therapeutische elastische beenkousen wegens lymfoedeem onder 15 jaar: <ul style="list-style-type: none"> Prefab: uitvoering AD, AG, AGT, AT, Mono AT in drukklasse II Maatwerk: uitvoering AD, AG, AGT, AT, Mono AT, Compressiebroek in drukklasse II 	4 kousen per been per kalenderjaar							
Therapeutische elastische beenkousen wegens lymfoedeem : <ul style="list-style-type: none"> Prefab: uitvoering AD, AG, AGT, AT, Mono AT in drukklasse III Maatwerk: uitvoering AD, AG, AGT, Mono AT in drukklasse III of IV. Compressiebroek in drukklasse II, III en IV 	4 kousen per been per kalenderjaar							
Therapeutische elastische beenkousen wegens chronische veneuze aandoeningen : Prefab en maatwerk: uitvoering AD, AG, AGT, AT, Mono AT in drukklasse III of IV	2 kousen per been per kalenderjaar							
Kousaantrekhelp 769731: éénmalige tussenkomst								

Aqtor! is erkend door alle mutualiteiten, verzekeringen en het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap). Naast het professioneel afleveren van orthopedische hulpmiddelen, mobiliteitshulpmiddelen en bandagisterie verzorgen we ook alle bijhorende administratie. We staan garant voor een optimale patiëntgerichte dienstverlening.

Daarnaast hechten wij veel belang aan een snelle en correcte service: snelheid van levering, technische dienst in onze eigen werkplaats of aan huis, ... U kunt op ons vertrouwen.



Herman Teirlinckstraat 15
9041 Oostakker
T +32 9 221 46 22
E info@aqtor.be

www.aqtor.be

